

FICHE TECHNIQUE

Système 3M™ de sécurisation de PICC/CVC + pansement 3M™Tegaderm™ IV Advanced

Nom en anglais : 3M™ PICC/CVC Securement Device + Tegaderm™ I.V. Advanced Securement


Indications :

- Système de maintien de cathéter
- Utilisé pour couvrir et protéger les sites d'insertion de cathéters de type PICC-line (**Cathéter Veineux Central à insertion périphérique**) ou de **Cathéter veineux central court terme**
- Le stabilisateur est utilisable avec des cathéters de simple à triple lumières, jusqu'à 12 French (4mm)

Composition :

Le système de sécurisation 3M™ se compose d'un stabilisateur et d'un pansement 3M™Tegaderm IV Advanced.

1) Le stabilisateur de PICC/CVC (ref. 2100)

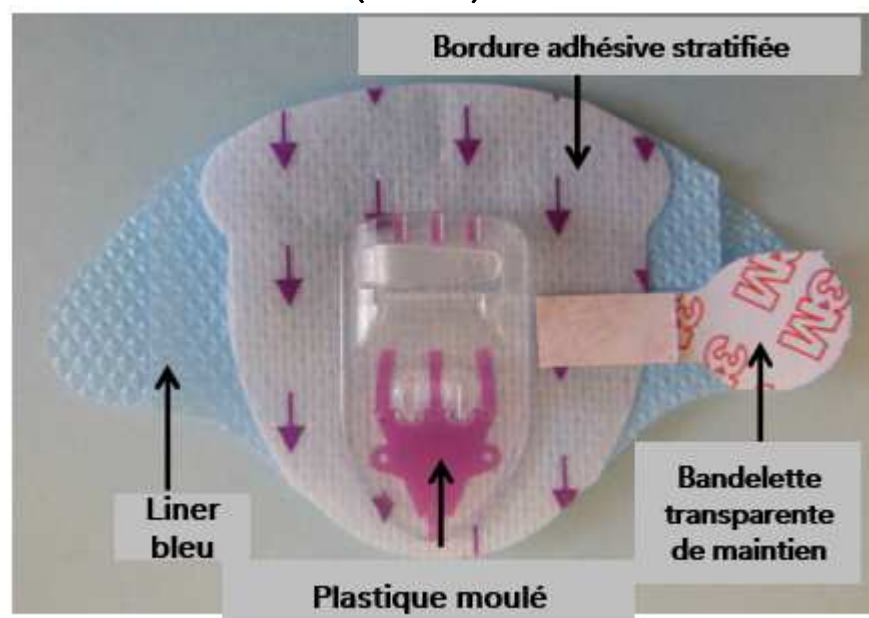

Matériau brut


Matière plastique moulé: polycarbonate

Bandelette transparente avec liner: polyéthylène avec adhésif en caoutchouc synthétique (sans latex), liner papier imprimé 3M

Bordure adhésive stratifiée: polyéthylène avec adhésif en caoutchouc synthétique (sans latex), polyester non-tissé avec un support film en polyester et adhésif siliconé

Liner bleu: polyéthylène, en relief

2) Pansement 3M™ Tegaderm I.V. Advanced (Ref. 1837 & 1839)

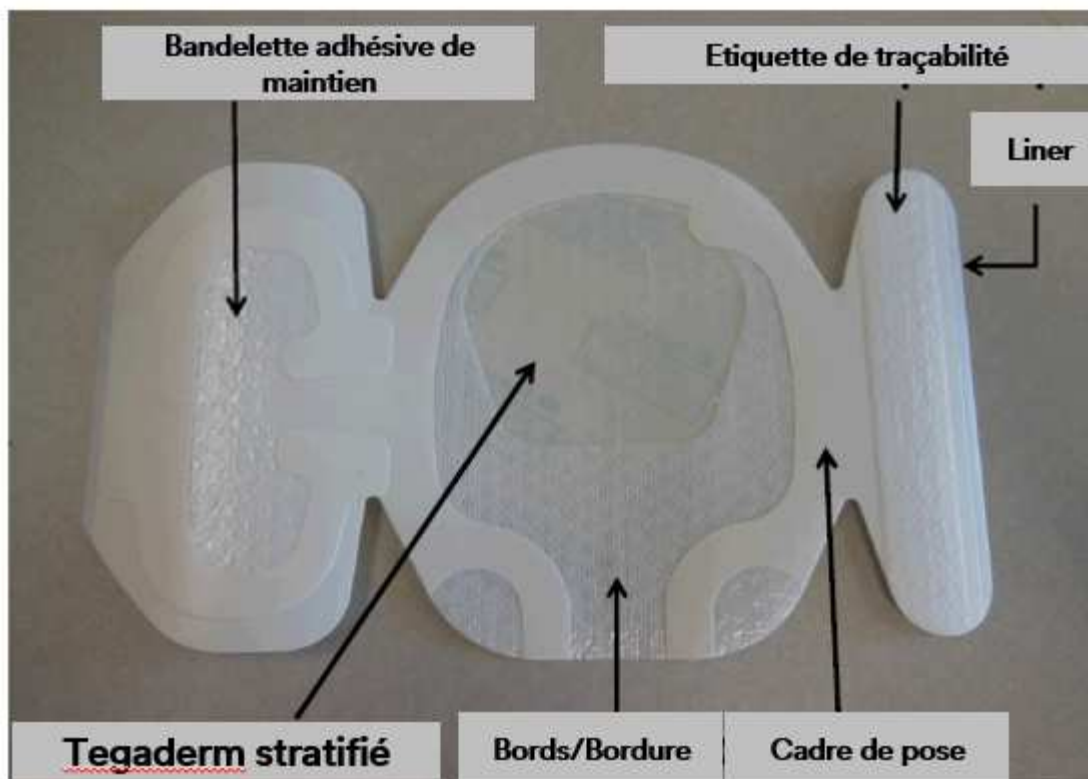

Matériau brut

Tegaderm stratifié: polyuréthane avec adhésif en acrylate

Bordure/Bords: polyester non tissé avec adhésif en acrylate



Cadre de pose : Papier

Bandelette de traçabilité : polyuréthane avec adhésif en acrylate / polyester non tissé avec adhésif en acrylate

Bandelette adhésive de maintien : polyuréthane et acrylate / polyester non tissé et acrylate

Liner: papiers imprimés

Les 2 produits (1) (stabilisateur) et (2)(le pansement) ne peuvent être vendus séparément.

Références	code commande	désignation	Contenu Pochette stérile	Conditionnement par bte
1837-2100 	TE183721	Système 3M™ de sécurisation de PICC/CVC + Pansement 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced	Pansement 8,5cm x 11,5 cm / stabilisateur 5,1cmx5,4cm	20
1839-2100 	TE183921	Système 3M™ de sécurisation de PICC/CVC + Pansement 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced	Pansement 10cm x 15,5cm/ stabilisateur 5,1cmx5,4cm	20

Le conditionnement de la pochette stérile comprend le stabilisateur et le pansement 3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced.

Biocompatibilité et caractéristiques techniques du système de sécurisation :

- Non cytotoxique
- Non irritant
- Non sensibilisant → Hypoallergénique
- Sans latex et stérile tant qu'il n'est pas ouvert ou endommagé
- Laisse respirer la peau
- Imperméable aux virus, bactéries et à l'eau (Des tests *in vitro* ont montré que Tegaderm™ IV Advanced, Securement dressing constitue une barrière aux particules de plus de 27nm de diamètre)

Classification du produit : Dispositif médical stérile de classe IIa selon la Directive 93/42 CEE

Marquage CE : Oui – Organisme notifié 0086 – Marquage CE 0086

Origine des matières premières : U.S.A.

Lieu de fabrication : U.S.A.

Mode de Stérilisation : Oxyde d'Ethylène

Lieu de stérilisation : U.S.A.

Durée de vie : 2 ans

Condition de conservation : température inférieure à 30°C

C 3SD- 000472

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée au risque et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champs de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.



3M France
Marchés de la Santé
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
N° Azur : 0 810 331 300
Fax : 01.30.31.85.51

Juillet 2015