


1 Appui long pour Mettre sous Tension ou pour éteindre la pompe.

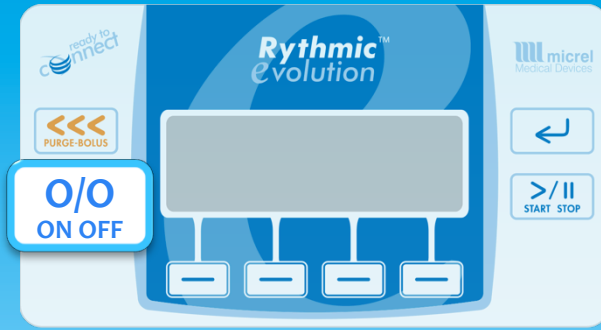

Pompes à perfusion Rythmic™ Evolution Mode Condensé

2 Un seul code pour tout faire :

0111

Taper le code & valider

Programmer un nouveau patient

> **NOUVEAU PATIENT**
CHANGEMENT POCHE
REDEMARRAGE APRES OFF

Sélectionner avec ▼▲ puis valider

CONCENTRATION
00,1 mg/ml
UNITE

Vérifier l'unité de programmation
Presser UNITE pour la modifier selon prescription

Sélectionner les valeurs prescrites et confirmer

Faire défiler le protocole et modifier les valeurs selon prescription

Valider la programmation

Changer la poche

> **NOUVEAU PATIENT**
CHANGEMENT POCHE
REDEMARRAGE APRES OFF

Sélectionner avec ▼▲ puis valider

VOLUME A PERFUSER
0100 ml

Volume précédemment perfusé
Modifier et/ou valider

PERFUSE 95ml | DEMANDE 12
PERFUSE 10
R.A.Z

Remettre A Zéro selon prescription

Reprendre la perfusion après arrêt de la pompe

> **NOUVEAU PATIENT**
CHANGEMENT POCHE
REDEMARRAGE APRES OFF

Sélectionner avec ▼▲ puis valider

0000

Valider

3 Double appui pour démarrer et verrouiller la perfusion



DOUBLE CLICKER SUR LA TOUCHE POUR L'ACTIVER


-Modifier la programmation en cours de perfusion

Verrouiller la perfusion


Pompes à perfusion Rythmic™ Evolution Mode Condensé




Administrer un bolus médecin

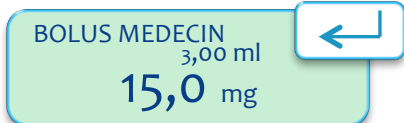


Modifier selon prescription et /ou valider

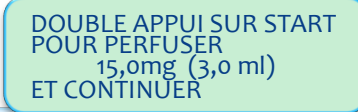

Modifier le protocole en cours

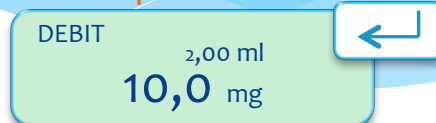

Sélectionner la valeur selon prescription puis valider

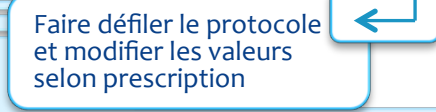

-Reprendre la perfusion...



-Interpréter les alarmes, **presser [left arrow] **pour mettre la pompe en pause****

Pas d'alarme d'air !

Bulles d'air éliminées par le filtre de la tubulure

OCLUSION AVAL
HISTO. RESUME

Reprise automatique quand occlusion levée (selon configuration)

STOP VOLET OUVERT [right arrow]

Vérifier le volet de fermeture du segment de pompe

PRE ALARME FIN DE PERFUSION [right arrow]

Volume restant à perfuser < 3ml (Configuration de la pompe par défaut)

PRE ALARME PILE FAIBLE [right arrow]

Reste 12h à 2ml/h

ALARME ERREUR : C-xx

Erreur technique, vérifier interférence électromagnétique. Eteindre et rallumer, confier à Technicien Agréé si persistant

STOP FIN DE PERFUSION [right arrow]

Mettre sur "Off" changer la poche

STOP PILE USAGEE [right arrow]

Mettre sur "Off" changer la pile